

Wewa® Med Symphysen-Bandage

Durch hormonelle Umstellungen kann es während einer Schwangerschaft zu Lockerungen im Iliosakralen- und Symphysenbereich kommen, was für den Geburtsvorgang wichtig ist. Diese Symphysenbandage kann diesen Lockerungen und ernsthaften Beschwerden während und nach der Schwangerschaft vorbeugen. Gleichzeitig kann die Bandage eine Schmerzlinderung bei schwangerschaftsbedingten Beschwerden im Bereich der Schambeinfuge bewirken.

Indikationen

- Symphysendehiszenz-Symphysiolyse
- Symphysenruptur
- nach Symphyseotomie
- Symphysenschmerzen während und nach der Schwangerschaft

Nicht anwenden bei Lymphödem im Bauch- oder Beckenbereich, Frakturen im Bauch- oder Beckenbereich und bei lokalen Hauterkrankungen.

Anwendungshinweise

- Die Bandage so anlegen, dass die Gurtkreuze seitlich auf den Hüften sitzen und der Hakenverschluss unter dem Bauch geschlossen werden kann
- Der optimale Sitz und Halt der Bandage kann durch die Gurte über dem Gesäß eingestellt werden

Materialien


- Baumwolle, sonstige Fasern, Polyamid, Polyester

Pflege- und Waschinweise

- Bandage: siehe Wäscheetikett
- Keinen Weichspüler verwenden

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!

BMV POS.-NR.
23.11.01.0004

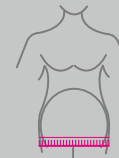

Maß über
Hüfte/Schambein

Art./REF	Größe	Umfang
10011	XS	ca. 70 - 85 cm
10012	S	ca. 80 - 95 cm
10013	M	ca. 90 - 105 cm
10014	L	ca. 100 - 115 cm
10015	XL	ca. 110 - 125 cm
10016	XXL	ca. 120 - 135 cm