

# Truncuflex® Postoperativer Stütz- und Entlastungsverband für Damen und Herren

Das elastische und hautfreundliche Material des postoperativen Stütz- und Entlastungsverbandes sorgt für die therapeutisch erwünschte, gleichmäßige Kompression bei höchstem Tragekomfort. Mittels des Klettverschlusses ist die Kompression nach den individuellen Bedürfnissen einstellbar. Geeignet für Damen und Herren.

## Indikationen

- Postoperative Versorgung nach Operationen im Bauchraum
- Bandscheibenbeschwerden
- Hernien im Bauch-/Beckenbereich, z. B. Nabelhernien
- Leichte Lumbalbeschwerden
- Hängeleib
- Zur Stützung geschwächter Bauchmuskulatur (z.B. nach der Schwangerschaft)
- Wirbelsäulenveränderungen

Nicht anwenden bei arteriellen Gefäßerkrankungen, allergischen Hautreaktionen, Stauungsödemen und extremen anatomischen Besonderheiten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

## Anleheinweise

- Den Stützverband um den Körper legen und den Klettverschluss so spannen, dass er gerade auf dem Flausch liegt
- Zum Korrigieren der Kompression den Verband vollständig öffnen und dann mit gewünschter Spannung verschließen
- Falls der Stütz- und Entlastungsverband nicht korrekt sitzt, sollte es vermieden werden, diesen durch Ziehen und Zeren zurechtzurücken
- Nicht mit den Fingernägeln in das Material fassen. Durch unsachgemäße Handhabung können sich die Fäden verschieben, was aber keinen Einfluss auf die Wirkungsweise des Verbandes hat und daher auch kein Reklamationsgrund ist. Mit wenigen Handgriffen können die Fäden wieder in die ursprüngliche Form geschoben werden.

## Materialien

- Siehe Wäscheetikett

## Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen Klettverschluss schließen!
- Siehe Wäscheetikett

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!**

HMV POS.-NR.  
05.11.01.0036

