

Truncuflex® Rippenbandage Damen

Die Truncuflex® Rippenbandage besteht aus einem elastischen Textilmaterial und sorgt für eine gleichmäßig flächendeckende Kompression. Die hautfreundlichen, atmungsaktiven und latexfreien Materialien versprechen einen hervorragenden Tragekomfort. Mittels Klettverschluss kann der Verband leicht an- bzw. abgelegt und individuell angepasst werden.

Indikationen

- Rippenbrüche/-prellungen
- Verletzungen des Brustraumes (Thorax)

Nicht anwenden bei arteriellen Gefäßerkrankungen, allergischen Hautreaktionen, Stauungsödemen und extremen anatomischen Besonderheiten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Anlegehinweise

- Den Verband um den Körper legen und den Klettverschluss so spannen, dass er gerade auf dem Flausch liegt
- Zum Korrigieren der Kompression den Verband vollständig öffnen und dann mit gewünschter Spannung verschließen
- Falls die Rippenbandage nicht korrekt sitzt, sollte es vermieden werden, diesen durch Ziehen und Zerren zurechtzurücken
- Nicht mit den Fingernägeln in das Material fassen. Durch unsachgemäße Handhabung können sich die Fäden verschieben, was aber keinen Einfluss auf die Wirkungsweise des Verbandes hat und daher auch kein Reklamationsgrund ist. Mit wenigen Handgriffen können die Fäden wieder in die ursprüngliche Form geschoben werden



Materialien

- Siehe Wäscheetikett

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen Klettverschluss schließen!
- Siehe Wäscheetikett

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!

