

Truncuflex® – Postoperativer Stütz- und Entlastungsverband

Indikationen

- Postoperative Versorgung von Abdomen- oder Thoraxoperationen
- Bandscheibenbeschwerden
- Hernien im Bauch-/Beckenbereich, z. B. Nabelhernien
- Rippenbrüche/-prellungen
- Leichte Lumbalbeschwerden
- Hängeleib
- Redression nach Schwangerschaft

Nicht anwenden bei arteriellen Gefäßerkrankungen, allergischen Hautreaktionen und -reizungen, Stauungsödemen und extremen anatomischen Besonderheiten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Anlegehinweise

- Den Stützverband um den Körper legen und den Klettverschluss so spannen, dass er gerade auf dem Flansch liegt
- Zum Korrigieren der Kompression den Verband vollständig öffnen und dann mit stärkerer Spannung verschließen

Materialien

- Siehe Wäscheetikett

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen Klettverschluss schließen
- Siehe Wäscheetikett

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!



Art./REF	Größe	Umfang	Höhe
1151	1	70 - 80 cm	ca. 23 cm
1152	2	81 - 90 cm	
1153	3	91 - 100 cm	
1154	4	101 - 110 cm	
1155	5	111 - 120 cm	
1156	6	121 - 130 cm	
1157	7	131 - 150 cm	

HMV Pos.-Nr. 05.11.01.0036



Maß Leibumfang

Bei Verwendung im Thoraxbereich

Maß Brustumfang bzw. Unterbrustumfang