

# Wewa® Med Leibbinde Damen und Herren, anprobefertig

Die Leibbinde besteht aus Drell Material mit zwei elastischen Einsätzen sowie je zwei seitlich verlaufenden, unelastischen Zügeln, mit denen eine zusätzliche unterstützende Wirkung erzielt werden kann.

## Indikation

- Nach Bauchdeckenhernie oder Bauchdeckenlähmung

Nicht anwenden bei Rücken- und Lumbalbeschwerden.

## Anleheinweise

- Die einstellbaren Zuggurte öffnen und die Schnürung lockern
- Die Leibbinde um die Taille legen und mit dem Haken-/Augenband vorne links verschließen
- Die Leibbinde sitzt richtig, wenn sich die Schnürung (je nach Ausführung) entweder auf dem Rücken oder auf der rechten Seite befindet
- Die Schnürung einmalig an die individuellen Bedürfnisse anpassen
- Ein wiederholtes Anlegen kann dann über das Haken-/Augenband erfolgen
- Abschließend die seitlich verlaufenden Zügel befestigen, durch die Metallösen ziehen und mit den Haken justieren

## Materialien

- Drell, Linon, Elastinova, Velours

## Pflege- und Waschinweise

- Leibbinde: siehe Wäscheetikett
- Die Trocknung sollte nicht in direkter Hitze (Heizung) erfolgen

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!**



Damen-Leibbinde



Herren-Leibbinde