


# Wewa® Med LS - Mobilisierungsorthese

Die Wewa® Med LS-Mobilisierungsorthese bietet die optimale Unterstützung im gesamten Therapieverlauf. Die mit wenigen Handgriffen mögliche Abrüstung erlaubt dem Patienten eine therapeutisch gewünschte größere Bewegungsfreiheit und unterstützt so den Wiederaufbau der muskulären Stabilität.

Das hautfreundliche Material und die anatomische Konstruktion sorgen für optimalen Tragekomfort bei höchster Wirksamkeit.

Art./REF 4761	Größe S	Größe M	Größe L	Größe XL
Hüftumfang	55 - 85 cm	80 - 110 cm	105 - 120 cm	120 - 135 cm

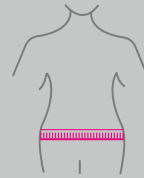

Maß Hüftumfang



## Indikationen

- Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen
- Mittelschweres radikuläres und pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolisthese, Grad I, mit Lumbalgien
- Mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf)
- Zustand n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps
- Reizzustände der Iliosakralgelenke
- Instabilität der Wirbelsäule
- Osteochondrose

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

## Anwendungshinweise

Die Erstanpassung sollte durch Fachpersonal in einem orthopädietechnischen Fachbetrieb erfolgen.

- Vor dem Anlegen die Verstärkungsurte und den Verschluss öffnen
- Die Orthese um die Taille legen und vor dem Bauch verschließen
- Mittels der Verstärkungsurte den Druck individuell anpassen

## Mobilisierung

Je nach Heilungsverlauf ist es möglich, die Orthese abzurüsten um den Bewegungsspielraum zu vergrößern.

Dies darf ausschließlich auf Anweisung des behandelnden Arztes geschehen!

- Die hintere Abdeckung des Überbrückungskörpers öffnen (Abb. 1) und das Zuggurtungssystem lösen (Abb. 2)
- Die Klettverbindungen zwischen Überbrückungskörper und Orthese öffnen und den Überbrückungskörper entnehmen (Abb. 3)
- Die Orthese in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und gemäß der Anwendungshinweise anlegen

## Materialien

- Siehe Wäscheetikett

## Pflege- und Waschinweise

- Seitenteile / Bezug: Siehe Wäscheetikett
- Den Überbrückungskörper und das Zuggurtungssystem bei Bedarf vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!**



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3