


Wewa® Med TLS - Mobilisierungsorthese

Die Wewa® Med TLS-Mobilisierungsorthese bietet die optimale Unterstützung im gesamten Therapieverlauf. Die mit wenigen Handgriffen mögliche Abrüstung erlaubt dem Patienten eine therapeutisch gewünschte größere Bewegungsfreiheit und unterstützt so den Wiederaufbau der muskulären Stabilität.

Das hautfreundliche Material und die anatomische Konstruktion sorgen für optimalen Tragekomfort bei höchster Wirksamkeit.

Art./REF 4762	Größe S	Größe M	Größe L	Größe XL
Hüftumfang	55 - 85 cm	80 - 110 cm	105 - 120 cm	120 - 135 cm

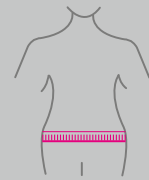

Maß Hüftumfang



Indikationen

- schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, ohne absolute OP-Indikation
- schweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- Spondylolisthese Grad II mit rezidivierenden Lumboischialgien
- Schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose
- Nach Bandscheiben-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter Bandscheibe
- Spinalkanaldekompensation, ein-etagig, ohne Deformität, BSOP einetagig
- Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne wesentliche Paresen
- Wirbelfrakturen postraumatisch geringen Ausmaßes

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Anwendungshinweise

Die Erstanpassung sollte durch Fachpersonal in einem orthopädietechnischen Fachbetrieb erfolgen.

- Vor dem Anlegen die Verstärkungsurte und den Verschluss öffnen
- Die Orthese um die Taille legen und vor dem Bauch verschließen
- Mittels der Verstärkungsurte den Druck individuell anpassen

Mobilisierung

Je nach Heilungsverlauf ist es möglich, die Orthese abzurüsten um den Bewegungsspielraum zu vergrößern.

Dies darf ausschließlich auf Anweisung des behandelnden Arztes geschehen!

- Die hintere Abdeckung des Überbrückungskörpers öffnen (Abb. 1) und das Zuggurtungssystem lösen (Abb. 2)
- Die Klettverbindungen zwischen Überbrückungskörper und Orthese öffnen und den Überbrückungskörper entnehmen (Abb. 3)
- Die Orthese in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und gemäß der Anwendungshinweise anlegen

Materialien

- Siehe Wäscheetikett

Pflege- und Waschinweise

- Seitenteile / Bezug: Siehe Wäscheetikett
- Den Überbrückungskörper und das Zuggurtungssystem bei Bedarf vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3