

Wewa® Med Daumen-Handgelenkorthese mit vorgeformten Aluminiumschienen

Die aus hautfreundlichem und atmungsaktivem Material gefertigte Orthese verfügt über zwei vorgeformte Aluminiumschienen, welche das Handgelenk und das Daumengelenk sicher immobilisieren. Die einstellbaren Klettverschlüsse ermöglichen eine individuelle Anpassung.

Indikationen

- Kontusionen und Distorsionen
- Kapsel-Bandläsionen
- Skidaumen
- Frakturbehandlung
- Tendovaginitis
- Akute und chronische Reiz- und Überlastungszustände
- Arthrotische Veränderungen von Hand- und Daumengelenk
- Postoperative Ruhigstellung
- Carpaltunnel-Syndrom

Nicht anwenden bei offenen Wunden.

Anwendungshinweise (Die Erstanpassung sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen!)

- Alle Klettverschlüsse öffnen
- In die Orthese schlüpfen (zuerst Handgelenk, dann Daumen)
- Klettverschlüsse schließen und bei Bedarf nachregulieren
- Veränderungen an der Orthese sollten ausschließlich von orthopädietechnischem Fachpersonal vorgenommen werden

Materialien

- Aluminium, Polyurethan, Polyamid, Polyester

Pflege- und Waschinweise

- Bitte entfernen Sie vor dem Waschen die Schienen aus der Tasche und schließen Sie den Klettverschluss
- Daumen-Handgelenkorthese: siehe Wäscheetikett
- Nicht auswringen! Ausgebretet bei Zimmertemperatur trocknen lassen!
- Die Schienen erst einlegen, wenn die Orthese vollständig getrocknet ist!

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!

