

# Wewa® Med Hallux Valgus-Nachtorthese

Die Hallux Valgus-Nachtorthese korrigiert die Stellung der schräggestellten Großzehe durch eine einfache aber hochwirksame Nutzung der Hebelwirkung.  
Die ausgewählten Materialien geben allergrößte Sicherheit und einen angenehmen Tragekomfort.

## Indikationen

- Konservative Behandlung des Hallux Valgus
- Postoperative Stabilisierung nach Korrektur-OP

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.


## Anwendungshinweise

- Die Orthese von vorn so auf den Fuß schieben, dass die Zehenfassung zwischen der Großzehe und dem zweiten Zeh liegt. Die Großzehe soll in der schalenförmigen Fassung liegen
- Das Klettband so weit spannen, dass die Großzehe möglichst gerade ausgerichtet wird ohne dass es unangenehm wird
- Veränderungen an der Orthese sollten ausschließlich von orthopädietechnischem Fachpersonal vorgenommen werden
- Die Orthese darf nicht im Schuh getragen werden

## Materialien

- 40% Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- 40% Ethylvinylacetat (EVA)
- 20% Nylon

## Pflege- und Waschinweise

- Die Orthese sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden
- Nach dem Reinigen an der Luft trocknen lassen, keine Wärmequellen zur Trocknung nutzen
- 

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!**

