

Wewa® Med Sprunggelenkorthese

zur Stabilisierung nach Verletzungen

Die Wewa® Med Sprunggelenkorthese sorgt durch zwei mit Schaumstoff gepolsterte Kunststoffschalen für eine optimale Stabilisierung des Sprunggelenks nach Verletzungen. Die Orthese kann problemlos in jedem Halb- oder Sportschuh getragen werden und ermöglicht damit die bestmögliche Mobilität und Sicherheit.

Indikationen

- Verletzungen des Sprunggelenks/Bandapparates
- Kontusionen
- Distorsionen
- Kapselverletzungen
- Postoperativ zur Stabilisierung nach Bandnaht
- Nachbehandlung von Frakturen
- Chronische Sprunggelenkinstabilitäten

Nicht anwenden bei arteriellen Gefäßerkrankungen, allergischen Hautreaktionen und -reizungen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Anwendungshinweise (Die Erstanpassung sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen!)

- Die Klettbänder öffnen und die Orthese so anlegen, dass der Fuß auf dem verstellbaren Fußteil positioniert ist und die Kunststoffschalen an der Innen- und Außenseite des Knöchels anliegen
- Bei Bedarf das Fußteil über die innenliegenden Klettverschlüsse in der Weite regulieren
- Die Orthese über die beiden breiten Klettbänder verschließen und bei Bedarf nachjustieren

Materialien

- Kunststoffmischung mit weicher Polsterung aus Memory Foam

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen der Schaumstoffpolster die Kunststoffschalen entfernen
- Die Polsterung wird bei 30° C Handwäsche gewaschen (siehe Wäscheetikett), die Kunststoffschalen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden
- Ausgebreitet bei Zimmertemperatur trocknen lassen
- Die Kunststoffschalen erst einlegen, wenn die Polsterung vollständig getrocknet ist

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!



Art./REF	Größe	Farbe
60061	Universal	Grau/Schwarz

