

Wewa® Med Handgelenkorthese mit Fingerauflage

Die Handgelenkorthese mit Fingerauflage zeichnet sich durch die sichere Fixierung und den hohen Tragekomfort aus und sorgt so für eine zuverlässige Sicherung des Therapieerfolges.

Indikationen

- Karpaltunnelsyndrom
 - Schmerzhaftes Arthrose des Handgelenks
 - Rheumatoide Arthritis des Handgelenks
 - Tendovaginitis
 - Luxation
 - Nach operativen Eingriffen sowie Sehnen-, Band- und Weichteilverletzungen
 - Distorsion
 - Posttraumatische und postoperative Reizzustände
- Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Anwendungshinweise (Die Erstanpassung sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen!)

- Sofern erforderlich, den Klettverschluss der Aluminiumschiene lösen und diese auf die zu behandelnde Seite umstecken
- Durch Kaltverformen der Aluminiumschiene lässt sich bei Bedarf die Stellung des Handgelenks anpassen

Nach der Erstanpassung

- Alle Klettverschlüsse öffnen
- Die Hand auf die Orthese legen
- Als erstes den Verschluss am Daumen, dann die Verschlüsse am Unterarm und zuletzt das Band der Fingerauflage schließen
- Bei Bedarf kann die Festigkeit der Bänder nun nachreguliert werden
- Veränderungen an der Orthese sollten ausschließlich von orthopädietechnischem Fachpersonal vorgenommen werden!

Materialien

- Polyester-Abstandsgewirk

Pflege- und Waschinweise

- Bitte vor dem Waschen die Schiene aus der Tasche entfernen und den Klettverschluss schließen
- Handgelenkorthese: siehe Wäscheetikett
- Nicht auswringen! Ausgebreitet bei Zimmertemperatur trocknen lassen!
- Die Schiene erst einlegen, wenn die Handgelenkorthese vollständig getrocknet ist!

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen bei einer Person Gebrauch verwenden!

