

Wewa® Med Sprunggelenkorthese Plus zur Stabilisierung nach Verletzungen

Die Wewa® Med Sprunggelenkorthese Plus zeichnet sich aus durch eine das Sprunggelenk fest umschließende aber trotzdem atmungsaktive Manschette aus modernsten Textilien. Eingebettet in diese sorgen Kunststoffbügel auf beiden Seiten für die notwendige Stabilität und Sicherheit, über den Zügel kann die Kompression individuell eingestellt werden.

Indikationen

- Frühfunktionale konservative Therapie akuter Verletzungen des Kapsel-Bandapparates
- Kontusionen
- Kapselverletzungen
- Arthrosen im oberen und unteren Sprunggelenk
- Chronische Instabilität des Sprunggelenks
- Nachbehandlung von Knöchelbrüchen (Frakturen)
- Sekundärprävention nach Sprunggelenksverletzungen
- Distorsionen
- Postoperative Stabilisierung

Nicht anwenden bei arteriellen Gefäßerkrankungen, offenen Wunden oder allergischen Hautreaktionen und -reizungen. Es sollte immer ein gut sitzender Strumpf unter der Orthese getragen werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Anwendungshinweise (Die Erstanpassung sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen!)

- Die Klettbänder öffnen
- Die Orthese über den Fuß ziehen, dabei bitte die hinten angebrachte Lasche zum Ziehen nutzen
- Das hintere Klettband schließen
- Nachfolgend das vordere Verschlussband schräg über den Spann auf das hintere Verschlussband ziehen, dann oberhalb des Knöchels verschließen

Materialien

- s. Einnähetikett

Pflege- und Waschinweise

- s. Einnähetikett



Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!