

Wewa® Med Clavicula zur Therapie von Schlüsselbeinfrakturen

Die Claviculabandage wird zur konservativen und postoperativen Therapie von Frakturen des Schlüsselbeines eingesetzt.

Die Kombination aus höchstem Tragekomfort durch modernste Gewebe und einer sicheren Fixierung sorgt für eine zuverlässige Therapie.

Indikationen

- Konservative Therapie von Clavicula-Frakturen
 - Zur postoperativen Stabilisierung von Clavicula-Frakturen
- Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Anwendungshinweise (Die Erstanpassung sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen!)

- Die Bandage so anlegen, dass das Rückenpolster zwischen den Schulterblättern aufliegt und die Klettverschlüsse („Entenschnabel“) entfernen
- Die Schultergurte entlang der Steppnähte so mit der Schere kürzen, dass die Klettverschlüsse am Übergang vom Rücken zur Seite aufliegt (sh. Abbildung)
- Die Klettverschlüsse wieder an die Schultergurte setzen und diese in der therapeutisch gewünschten Position fixieren
- Bei Bedarf die Spannung der Schultergurte regulieren



Materialien

- Polyester-Abstandsgewirk

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und falls möglich ein Wäschenetz verwenden
- Siehe Wäscheetikett

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!

Universal-
größe

