

Wewa® Ped Verbandschuh

Der Verbandschuh bietet durch den bequemen Einstieg, seine rutschfeste Sohle und das atmungsaktive Obermaterial die optimale Unterstützung in der Genesungsphase.

Indikationen

- Postoperativ nach Eingriffen am Fuß
- Wunden bei Ulcerationen
- Nach Fußverletzungen
- Bei starker Schwellneigung der Füße
- Rheumatische Erkrankungen

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Anwendungshinweise


- Zuerst die beiden Klettbinden, danach den darunter befindlichen Verschluss öffnen
- Die Lasche zurückklappen und den darunter liegenden Verschluss am Vorfuß öffnen
- Schuh anziehen und in der umgekehrten Reihenfolge verschließen
- Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Fersenweite mittels der hinteren Lasche zu korrigieren
- Die Vorfußkappe kann bei Bedarf durch das Lösen der Klettverbindung einfach entfernt und wieder angebracht werden
- Die Einlegesohle kann entnommen und durch eine individuell angefertigte Einlage ersetzt werden

Materialien

- 50 % Polyester, 35 % Ethylvinylacetat, 10 % Nylon, 5 % Gummi

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Einlage entnehmen
- Nur in einem dafür geeigneten Wäschenetz waschen
- Schuh: siehe Wäscheetikett
- Nicht in direkter Hitze trocknen

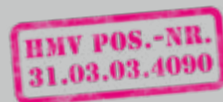

Wewa® Ped Verbandschuh

Art./REF	Größe	Schuhgröße
60083	XS	33 - 35
	S	36 - 38
	M	39 - 41
	L	42 - 44
	XL	45 - 47

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!