

Wewa® Ped Vorfuß-Entlastungsschuh

Der Vorfuß-Entlastungsschuh bietet durch den bequemen Einstieg, seine rutschfeste Sohle und das atmungsaktive Obermaterial die optimale Unterstützung in der Genesungsphase.

Indikationen

- Nach Vorfuß-Operationen
- Nach Verletzungen im Vorfußbereich
- Wunden im Vorfußbereich

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Anwendungshinweise

- Zuerst die beiden Klettbänder, danach den darunter befindlichen Verschluss öffnen
- Die Lasche zurückklappen und den darunter liegenden Verschluss am Vorfuß öffnen
- Schuh anziehen und in der umgekehrten Reihenfolge verschließen
- Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Fersenweite mittels der hinteren Lasche zu korrigieren
- Die Vorfußkappe kann bei Bedarf durch das Lösen der Klettverbindung einfach entfernt und wieder angebracht werden
- Die Einlegesohle kann entnommen und durch eine individuell angefertigte Einlage ersetzt werden


Materialien

- 50 % Polyester, 35 % Ethylenvinylacetat, 10 % Nylon, 5 % Gummi

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Einlage entnehmen
- Nur in einem dafür geeigneten Wäschenetz waschen
- Schuh: siehe Wäscheetikett
- Nicht in direkter Hitze trocknen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!

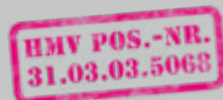

Wewa® Ped Vorfuß-Entlastungsschuh

Art./REF	Größe	Schuhgröße
60084	XS	33 - 35
	S	36 - 38
	M	39 - 41
	L	42 - 44
	XL	45 - 47