

# Wewa® Ped Rückfuß-Entlastungsschuh

Der Rückfuß-Entlastungsschuh bietet durch den bequemen Einstieg, seine rutschfeste Sohle und das atmungsaktive Obermaterial die optimale Unterstützung in der Genesungsphase.

## Indikationen

- Nach Rückfuß-Operationen
- Nach Verletzungen im Rückfußbereich
- Wunden im Rückfußbereich

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

## Anwendungshinweise

- Zuerst die beiden Klettbänder, danach den darunter befindlichen Verschluss öffnen
- Die Lasche zurückklappen und den darunter liegenden Verschluss am Vorfuß öffnen
- Schuh anziehen und in der umgekehrten Reihenfolge verschließen
- Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Fersenweite mittels der hinteren Lasche zu korrigieren
- Die Vorfußkappe kann bei Bedarf durch das Lösen der Klettverbindung einfach entfernt und wieder angebracht werden
- Die Einlegesohle kann entnommen und durch eine individuell angefertigte Einlage ersetzt werden


## Materialien

- 50 % Polyester, 35 % Ethylenvinylacetat, 10 % Nylon, 5 % Gummi

## Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Einlage entnehmen
- Nur in einem dafür geeigneten Wäschenetz waschen
- Schuh: siehe Wäscheetikett
- Nicht in direkter Hitze trocknen

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!**

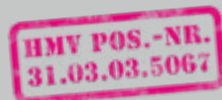

## Wewa® Ped Rückfuß-Entlastungsschuh

| Art./REF | Größe | Schuhgröße |
|----------|-------|------------|
| 60085    | XS    | 33 - 35    |
|          | S     | 36 - 38    |
|          | M     | 39 - 41    |
|          | L     | 42 - 44    |
|          | XL    | 45 - 47    |