

Wewa® Ped Verbandschuh F

Der Verbandschuh bietet durch den bequemen Einstieg, die rutschfeste Sohle und das atmungsaktive Obermaterial die optimale Unterstützung in der Genesungsphase. Der nur 17 mm hohe Sohlenaufbau ermöglicht ein nahezu natürliches Gangbild und erhöht die Gangsicherheit deutlich. Eine stabile Sohlenversteifung sorgt für die erwünschte Aufhebung der natürlichen Abrollbewegung.

Indikationen

- Postoperativ nach Eingriffen am Fuß
- Wunden bei Ulcerationen
- Nach Fußverletzungen
- Bei starker Schwellneigung der Füße
- Rheumatische Erkrankungen

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.



Anwendungshinweise

- Zuerst die beiden Klettbänder, danach den darunter befindlichen Verschluss öffnen
- Die Lasche zurückklappen und den darunter liegenden Verschluss am Vorfuß öffnen
- Schuh anziehen und in der umgekehrten Reihenfolge verschließen
- Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Fersenweite mittels der hinteren Lasche zu korrigieren
- Die Vorfußkappe kann bei Bedarf durch das Lösen der Klettverbindung einfach entfernt und wieder angebracht werden
- Die Einlegesohle kann entnommen und durch eine individuell angefertigte Einlage ersetzt werden

Materialien

- 50 % Polyester, 35 % Ethylvinylacetat, 10 % Polyamid, 5 % Gummi

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Einlage entnehmen
- Nur in einem dafür geeigneten Wäschenetz waschen
- Schuh: siehe Wäscheetikett
- Nicht in direkter Hitze trocknen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!

Wewa® Ped Verbandschuh F

| Art./REF | Größe | Schuhgröße |
|----------|-------|------------|
| 60087 | XS | 33 - 35 |
| | S | 36 - 38 |
| | M | 39 - 41 |
| | L | 42 - 44 |
| | XL | 45 - 47 |