

Wewa® Ped Rehaschuh hoch

Der weite Einstieg sowie der großzügig bemessene und nahtlose Innenbereich machen den Wewa® Ped Rehaschuh zum optimalen Begleiter in Alltag und Therapie.

Die breiten Klettverschlüsse und die rutschhemmende Sohle sorgen für die notwendige Sicherheit.

Materialien

- Nylon, Polyurethan, Polyurethan-Schaum, Ethylenvinylacetat

HMV POS.-NR.
31.03.03.4101

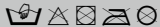
Indikationen

- Postoperativ bei Eingriffen am Fuß und nach Fußverletzungen
 - Wunden und Ulcerationen
 - Starke Schwellneigung der Füße
- Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Anwendungshinweise

- Alle Verschlüsse öffnen und die Lasche zurückklappen
- Nach dem Anziehen die Verschlüsse wieder schließen
- Die Einlegesohle kann durch eine individuelle Einlage ersetzt werden

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen und Einlage entnehmen
- Nur in einem geeigneten Wäschenetz waschen
- 
- Nicht in direkter Hitze oder Sonneneinstrahlung trocknen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!