

# Wewa® Ped Rehaschuh offen

Der weite Einstieg sowie der großzügig bemessene und nahtlose Innenbereich machen den Wewa® Ped Rehaschuh zum optimalen Begleiter in Alltag und Therapie.

Die breiten Klettverschlüsse und die rutschhemmende Sohle sorgen für die notwendige Sicherheit.

## Materialien

- Nylon, Polyurethan, Polyurethan-Schaum, Ethylenvinylacetat

HMV POS.-NR.  
31.03.03.4102

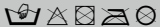
## Indikationen

- Postoperativ bei Eingriffen am Fuß und nach Fußverletzungen
  - Wunden und Ulcerationen
  - Starke Schwellneigung der Füße
- Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

## Anwendungshinweise

- Alle Verschlüsse öffnen und die Lasche zurückklappen
- Nach dem Anziehen die Verschlüsse wieder schließen
- Die Einlegesohle kann durch eine individuelle Einlage ersetzt werden

## Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen und Einlage entnehmen
- Nur in einem geeigneten Wäschenetz waschen
- 
- Nicht in direkter Hitze oder Sonneneinstrahlung trocknen

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!**