

Wewa® Ped Diabetikerschuh

Der Wewa® Ped Diabetikerschuh zeichnet sich durch das Fehlen von drückenden Nähten aus und trägt somit den besonderen Anforderungen bei Durchblutungsstörungen Rechnung. Darüberhinaus verfügt der Schuh im Fersenbereich über eine weiche Kappe und wird somit zu einem angenehmen Begleiter. Gleichzeitig bietet Ihnen der Wewa® Ped Diabetikerschuh durch den bequemen Einstieg, seine rutschfeste Sohle und das angenehme Obermaterial die optimale Unterstützung für Ihre Genesung. Der Schuh ist sowohl für den Innen- wie auch den Außenbereich verwendbar.

Indikationen

- Wunden und Ulcerationen
- Postoperativ nach Eingriffen am Fuß
- Nach Fußverletzungen
- Bei starker Schwellneigung der Füße
- Rheumatische Erkrankungen

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Anwendungshinweise

- Öffnen Sie beide Klettverschlüsse
- Klappen Sie die Laschen zurück
- Ziehen Sie nun den Schuh an, danach beide Klettverschlüsse schließen
- Der Schuh soll komfortabel und bequem am Fuß sitzen
- Die Einlegesohle kann entnommen und durch eine individuell angefertigte Einlage ersetzt werden

Materialien

- Polyamid, Polyurethan-Schaum, Ethylvinylacetat, Polyurethan

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Einlage entnehmen
- Nur in einem dafür geeigneten Wäschenetz waschen
- Schuh: siehe Einnähetikett
- Nicht in direkter Hitze trocknen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!



Wewa® Ped Diabetikerschuh		
Art./REF	Beschreibung	Größe
60096	Wewa® Ped Diabetikerschuh	35 - 48