

Wewa® Med Epicondylitis-Spange

Die Wewa® Med Epicondylitis-Spange sorgt bei Überbelastungen und Reizungen wie dem Tennisarm (Epicondylitis radialis) oder dem Golferarm (Epicondylitis ulnaris) für eine spürbare Entlastung und fördert die Ausheilung der Beschwerden.

Indikationen

- Epicondylitis radialis und ulnaris
- Chronische und rezidivierende Epicondylopathie
- Überlastungsbeschwerden

Kontraindikationen

- Lymphabflussstörungen und unklare Weichteilschwellungen
- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK)
- Empfindungsstörungen
- Hauterkrankungen im Anlagebereich der Epicondylitis-Spange

Anwendungshinweise

- Die Epicondylitis-Spange auf den Unterarm schieben und die Pelotte ca. 5 cm unter dem Ellenbogengelenk auf dem Muskelbauch der betroffenen Seite platzieren (durch das Ballen der Faust zeichnet sich der Muskelbauch deutlich ab)
- Den Klettverschluss schließen. Bei offener Hand soll die Epicondylitis-Spange anliegen ohne Druck auszuüben, es soll ausschließlich bei geballter Faust und Greifbewegungen Druck verspürt werden
- Bei Bedarf die Spannung nachregulieren

Materialien

- siehe Wäscheetikett

Pflege- und Waschinweise

- siehe Wäscheetikett
- Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und falls möglich ein Wäschenetz verwenden

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

Bitte beachten Sie: Wenn Sie bei der Verwendung dieses Medizinproduktes Grund zu der Annahme haben, dass ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Händler, Hersteller und Ihrer nationalen Behörde!



Art./REF	Größe	Farbe
60201	Universal	Grau/Schwarz