

PneumoKiss ArthroFit Vario

Eine aufrechte und gesunde Sitzhaltung ist nicht nur von der Beweglichkeit der Wirbelsäule sondern auch vom Grad der Beckenkipfung abhängig. Ist diese infolge arthrotischer Veränderungen des Hüftgelenks (auch bei Hüftarthrodese oder -ankylose) eingeschränkt, können aufgrund einer ungesunden Sitzhaltung Schädigungen der Wirbelsäule auftreten. Gleiches gilt für Kontrakturen im Bereich der Hüfte, z.B. nach Hüftgelenksoperationen. Die ArthroFit Kissen können helfen, diese Fehllhaltung auszugleichen.

Indikationen

- Bewegungseinschränkungen der Hüfte
- Arthrotische Veränderungen der Hüfte
- Nach Hüftgelenks- oder Oberschenkeloperationen
- Zur Rehabilitationsunterstützung nach Oberschenkelhalsbrüchen

Nicht anwenden bei schweren Sensibilitätsstörungen oder Dekubitus bzw. anderen Erkrankungen im Aufsitzbereich.

Anwendung

- Kissen auf eine geeignete, gerade Sitzfläche auflegen
- Den Wechselkeil mittels der Klettverbindung so ansetzen, dass er die gesunde Seite stützt und die betroffene Seite auf der Schräge liegt
- Bei Bedarf den Keil durch erneutes lösen und ansetzen nachjustieren

Materialien

- Innenkern: siehe Kissen
- Bezug: siehe Wäscheetikett

Pflege- und Waschinweise

- Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett
- Innenkern: mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar
- Nach dem Reinigen/Desinfizieren das Kissen gut durchtrocknen lassen

Eine Wartung ist nicht erforderlich.



Art./REF	Abmessung	Farbe
170140408	40 x 40 x 8 : 2 cm	Marine, Schwarz
170142420	42 x 42 x 10 : 3 cm	
170144442	44 x 44 x 12 : 4 cm	

Wichtiger Hinweis für alle Kissen:

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!

Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen!