

# EcoKiss ArthroFit Pro

Eine aufrechte Sitzhaltung ist nicht nur von einer ausreichenden Beweglichkeit und Flexibilität der Wirbelsäule abhängig. Der Grad der Beckenkipfung ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium. Eine eingeschränkte Beckenkipfung, wie z.B. bei einer Hüftarthrose oder Hüftankylose, hat oft eine falsche Sitzhaltung mit langfristigen Schäden für die Wirbelsäule zur Folge. Das gilt ebenso für Kontrakturen der Hüfte nach Totalendoprothese (TEP). Die EcoKiss Spezialkissen können diese Fehlhaltung ausgleichen.

## Indikationen

- Bewegungseinschränkungen der Hüfte
- Hüftankylose
- Nach Hüft-Totalendoprothese oder -Gelenkversteifung

Nicht anwenden bei schweren Sensibilitätsstörungen oder Dekubitus bzw. anderen Erkrankungen im Aufsitzbereich.

## Materialien

- Innenkern: Verbundschaumstoff
- Bezug: Velour, rutschfeste Unterseite (Polyurethan-Streifen)
- Tragegriffe: Synthetisches Gurtband; Kunststoff

## Pflege- und Waschinweise

- Abnehmbarer Bezug: siehe Wäscheetikett
- Bezug separat waschen und auf links drehen, um den Farbton zu erhalten
- Innenkern: mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar
- Nach dem Reinigen/Desinfizieren das Kissen gut durchtrocknen lassen

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwendbar!**  
**Reißverschluss nur auf geeigneten und kratzunempfindlichen Oberflächen auflegen!**

Bitte beachten Sie: Wenn Sie bei der Verwendung dieses Medizinproduktes Grund zu der Annahme haben, dass ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Händler, Hersteller und Ihrer nationalen Behörde.



Art./REF	Größe	Farbe
20921	42 x 42 x 11:3 cm	schwarz



Werkmeister GmbH + Co. KG • Eschweiger Straße 10 • 37281 Wanfried • Germany  
www.werkmeister-gmbh.de • QM-Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 • 21.05.25-70784



Werkmeister®