Wewa® Med Lindemann-Mieder Damen und Herren, anprobefertig

Das Lindemann-Mieder besteht aus gefütterten Linon-Material mit vier Stabtaschen im Rücken für den Fall eines optionalen Einsatzes von Stabilisierungsstäben. Es wird über ein wechselseitig angeordnetes 5-fach Klettverschluss-System fixiert.

Das Damen-Modell ist je nach Ausführung mit und ohne Elastinova Einsätze erhältlich. Das Klettverschluss-System kann alternativ auch in einer Reihe angeordnet sein.

Indikationen

- Degenerative Erkrankungen der Lendenwirbelsäule und des thorakolumbalen Übergangs
- Osteoporose mit Haltungsinsuffizienz
- Postoperative vorübergehende Immobilisation

Nicht anwenden bei abdominellen Erkrankungen, die keinen erhöhten Druck tolerieren.

Anlegehinweise

- · Alle Klettverschlüsse öffnen und das Mieder um den Leib legen
- Mit den Klettverschlüssen verschließen; beginnend mit dem mittleren Klett, anschließend den beiden benachbarten und zuletzt den außen liegenden Klettverschlüssen
- Bitte darauf achten, dass das Mieder angenehm sitzt
- Eine zu feste Fixierung ist zu vermeiden

Materialien

· Drell, Linon, Elastinova

Pflege- und Waschhinweise

- Vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen
- · Mieder: siehe Wäscheetikett
- Die Trocknung sollte nicht in direkter Hitze (Heizung) erfolgen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!



Damen-Lindemann-Mieder



Herren-Lindemann-Mieder

