

Wewa® Med Handgelenkorthese mit vorgeformter Aluminiumschiene

Die aus hautfreundlichem und atmungsaktivem Material gefertigte Orthese verfügt über eine vorgeformte Aluminiumschiene, durch die das Handgelenk immobilisiert wird. Die einstellbaren Klettverschlüsse ermöglichen eine individuelle Anpassung.

Indikationen

- Kontusionen und Distorsionen
- Kapsel-Bandläsionen
- Frakturnachbehandlung
- Tendovaginitis
- Akute und chronische Reiz- und Überlastungszustände
- Arthrotische Veränderungen
- Postoperative Ruhigstellung

Nicht anwenden bei offenen Wunden.

Anwendungshinweise (Die Erstanpassung sollte ausschließlich durch geschultes Fachpersonal erfolgen!)

- Alle Klettverschlüsse öffnen und die Orthese anlegen
- Klettverschlüsse schließen und bei Bedarf nachregulieren
- Veränderungen an der Orthese sollten ausschließlich von orthopädiem Fachpersonal vorgenommen werden

Materialien

- Aluminium, Polyurethan, Polyamid, Polyester, Acryl

Pflege- und Waschinweise

- Die Schiene aus der Tasche entfernen und Klettverschlüsse schließen
- Handgelenkorthese: siehe Wäscheetikett
- Nicht auswringen! Ausgebreitet bei Zimmertemperatur trocknen lassen!
- Die Schiene erst wieder einschieben, wenn die Handgelenkorthese vollständig getrocknet ist

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!

