

Osteolind® plus Rückenorthese

Die Osteolind® plus Rückenorthese sorgt für eine aktive Aufrichtung durch eine integrierte Reklinationsschiene aus Metall. Bei Bedarf kann in einem späteren Behandlungsstadium auf die Kunststoffschiene mit Flexspin Gelenk gewechselt werden.

Hoher Tragekomfort und einfache Handhabung

Die Osteolind® plus Rückenorthese kann dank der flexiblen Klettverschlüsse und der offenen Konstruktion der Schiene einfach angelegt und angepasst werden. Hautfreundliche und weiche Materialien sowie die perfekte Passform sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Der atmungsaktive Textilbezug der Rückenschiene vermindert eine Schweißbildung.

Indikationen

- Osteoporose
- Wirbelkörperfrakturen (z.B. Sinterungsfrakturen bei Osteoporose)
- Durch Schmerzen verursachte Fehlhaltungen (z.B. Rundrücken)
- Muskuläre Insuffizienz
- Postoperative Stabilisierung

Nicht tragen wenn das Druckgefühl auf den Bauch durch das Leibteil als unangenehm empfunden wird. Sollte die Rückenorthese zu eng bzw. zu fest am Körper anliegen, kann es zu lokalen Druckstellen bzw. Stauungen kommen. Die Osteolind® plus Rückenorthese sollte nicht im Liegen getragen werden. Bei unsachgemäßen Veränderungen sowie unsachgemäßer Anwendung schließen wir eine Produkthaftung aus.

Anwendungshinweise

- Die Schiene in die dafür vorgesehene Tasche stecken. Bitte beachten Sie, dass das breite Schienenende nach oben zum Kopf zeigt, das schmale in Richtung Lendenwirbelsäule
- Die Schiene ist dann korrekt in die Tasche gesteckt, wenn sich das breite Ende zum Körper hin wendet, und die Abnäher zur Fixierung über die Schienenenden gestülpt sind
- Das Leibteil öffnen und die Rückenorthese wie einen Rucksack anlegen
- Danach das Leibteil verschließen und im Umfang anpassen. Abschließend die Schultergurte auf dem Leibteil verschließen

Materialien

- Siehe Wäscheetikett

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen und die Schiene entnehmen
- Keinen Weichspüler benutzen
- Orthese: siehe Wäscheetikett
- Die Schiene kann mit einem feuchten Tuch, ggf. mit einer milden Seifenlauge abgewischt werden

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!



Abb. 1



Abb. 2

