

Stomabandage

Die Stomabandage bietet hohen Tragekomfort und ein sicheres Gefühl im Alltag. Die Anwendung der Bandage erfolgt zur postoperativen Unterstützung der Bauchwand und zur Prolapsvermeidung u.a. bei hoher körperlicher Aktivität (z.B. beim Sport). Hochelastische Materialien und eingearbeitete Stabilisierungsstäbe bieten eine optimale Anpassung und einen festen Sitz. Der Stomabereich ist durch eine Einlagefolie gesichert.

Indikationen

- Bauchdeckenschwäche
- Brüche im Narben- und Stomabereich
- Neigung zur Prolapsbildung

Nicht anwenden bei Hautirritationen, Entzündungen im Stomabereich, Prolaps und Einklemmungsgefahr im Bruch- und Stomabereich. Gegebenenfalls fragen Sie bitte Ihren behandelnden Arzt!

Anleheinweise

- Beim Anlegen der Bandage darauf achten, dass diese im lockeren Zustand korrekt sitzt. Den Druck und die Festigkeit beim Schließen der Bandage mit dem Klettverschluss regulieren
- Ist die Bandage geschlossen, sollte der Klettverschluss auf dem dafür vorgesehenen Flauschbereich sitzen
- Danach die Abdeckung der Stomaöffnung mittels Klettverschluss auf den dafür vorgesehenen Flauschbereich schließen

Materialien

- Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester

Pflege- und Waschinweise

- Siehe Wäscheetikett

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!



Hinweise für den Fachhändler

Anwendungs- und Bearbeitungshinweise

Stomabandage halbfertig – ohne Öffnung

- Sie haben die Möglichkeit, die Stomaöffnung individuell zu positionieren und den Durchmesser des Loches selbst zu bestimmen
- Die Bandage kann sowohl rechts als auch links eingesetzt werden
- Hierzu legen Sie die Bandage an und schließen diese, so dass die Bandage optimal sitzt
- Markieren Sie die Mitte des Stomas
- Auf einer flachen Unterlage zeichnen Sie die Öffnung auf
- Öffnung 0,5 cm größer schneiden für den elastischen Einfass
- Die dünne feuchtigkeitsundurchlässige, atmungsaktive Einlage erleichtert Ihnen das Ausschneiden
- Fassen Sie die Öffnung mit dem beiliegenden Einfassband ein

Stomabandage serienfertig – mit Öffnung

- Die Stomaöffnung bei der 10 cm und 15 cm hohen Bandage befindet sich in der Mitte und kann somit beidseitig verwendet werden
- Bei der 23 cm hohen Bandage befindet sich die Öffnung ca. 3,5 cm vom unteren Rand. Lieferbar rechts- oder linksseitig

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

